

ULTIMA

Des années-lumière d'avance...

- >> Nouveau mode multi-cycle
- >> Lentille diamètre XL (12,3mm)
- >> Gaine de protection intégrale
- >> Garantie 4 ans

MULTI-MODE | MULTI-INDICATION

PHOTO-POLYMÉRISATION | 4 MODES |

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> > SOFT
750 mW/cm²
10s + bip 5s > STANDARD
1200 mW/cm²
20s + bip 5s | <ul style="list-style-type: none"> > BOOST
2200 mW/cm²
3s > NOUVEAU MULTI-CYCLE
BOOST SEQUENTIEL
10 x (3s ON + 2s OFF) |
|---|---|

DIAGNOSTIC | 2 MODES |

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> > DIAGNOSTIC UV
LED UV | <ul style="list-style-type: none"> > TRANSILLUMINATION
LED Blanche |
|--|---|

SPÉCIAL
COVID-19



- > Nouvelle gaine de protection intégrale



VOIR LA VIDEO



- > **Lentille diamètre XL !**
Idéal pour l'omnipratique
comme pour les sessions
d'orthodontie



- > **Ultra-résistante & légère**
Aluminium type aéronautique,
ergonomique, maniable (21cm),
très légère (95g)



- > **Chargement sur base**



- > **Utilisation en continu** avec
2^e batterie + chargeur universel
(option)

RÉFÉRENCES & PRÉSENTATIONS

ULTI-G	Lampe + Base-chargeur + Batterie + 2 protections oculaires + 100 gaines. Aluminium
ULTI-N	Lampe + Base-chargeur + Batterie + 2 protections oculaires + 100 gaines. Noir mat
ULTI-G500	Gaines de protection intégrale x500
C-BAT	Chargeur universel (option)
BAT-3.7-L	Batterie supplémentaire (option)

DM : classe I.




Finition aluminium
ou noir mat

ULTRA PERFORMANTE POLYMERISATION & DIAGNOSTIC

ULTRA POLYVALENTE OMNIPRATIQUE & ORTHODONTIE

4 MODES PHOTO-POLYMERISATION				2 MODES DIAGNOSTIC	
SOFT	STANDARD	BOOST	BOOST MULTICYCLE	DIAGNOSTIC UV	TRANSILLUMINATION
⊗ ● ●	⊗ ● ●	● ● ●	● ● ●	⊗ ● ⊗	● ⊗ ⊗
10s	20s	3s	10x (3s ON + 2s OFF)	120s	120s

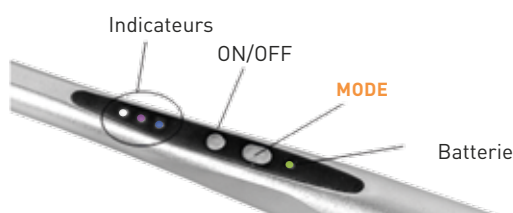


- ⊗ OFF
- ON fixe
- ON clignotant
- ▶ Pression sur MODE

La lampe ULTIMA est constituée d'un manche d'une pièce sur lequel est scellé de façon étanche, un panneau de contrôle et une lentille résistante aux rayures.

Après chaque utilisation, essuyez la surface de la lentille avec une lingette ou une compresse imbibée d'un désinfectant anti-microbien. (cf Notice p.8)

Vérifiez régulièrement qu'aucun résidu de résine n'est présent sur la lentille.

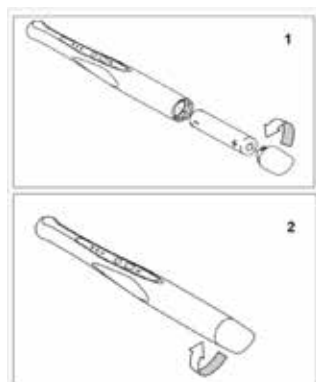

Remplacement batterie [BAT-3.7L]

Les protections intégrales à usage unique empêchent la contamination croisée et évitent l'adhésion de composite ou résine dentaire à la surface de la lentille et du corps de la lampe.



Protection jetable intégrale [ULTI-G500]